



Rhino[®]

180 kg / 100 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Inteligente para Peso Corporal Body Fat Scale

- Monitorea tu progreso semanal, mensual y anual
- Modo de pesaje para bebés
- Con conexión bluetooth 4.0
- Configura hasta 24 usuarios
- App disponible para sistemas operativos IOS y Android



IMPORTANTE:
Lea este manual
antes de encender
la báscula



Descarga la aplicación
escaneando el código QR



Sistema Operativo IOS



Sistema Operativo Android

MANUAL DE USO MODELO: BABAIN-180NG



Funciona con 2
baterías AAA de 1.5 V



Encendido y
apagado automático



APP gratuita para
tu smartphone

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula modelo BABAIN-180NG ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BABAIN-180NG y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media (III)

Capacidad: Máx: 180 kg Min: 2 kg
d=e= 100 g d_T: 100 g Lim: 270 kg
Alimentación: 3 Vcc (2 Baterías AAA de 1.5 Vcc)

Temperatura de Operación: -10 °C a 40 °C

GUIA RÁPIDA DE USO







1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (manual y 2 pilas AAA).
2. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada, asegúrese de colocar correctamente las baterías. cualquier movimiento por mínimo que sea puede afectar la exactitud.
3. Coloque los pies en el centro de la báscula.

PRECAUCIONES

1. La pantalla mostrará “Lo” cuando sea necesario reemplazar las baterías.

2. La pantalla mostrará “Err” cuando se sobrecargue la báscula.
3. Remueva el sobrepeso para evitar daños.
4. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco.
5. Solamente para uso doméstico.
6. NO USAR para fines comerciales.

ADVERTENCIAS

-  No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
-  Para limpiar la báscula utilice un paño o una esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe la báscula.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula durante su uso.
-  No deje expuesta su báscula a goteo o salpicadura de líquidos.


En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

ADVERTENCIA DE USO

1. NO se utilice con implantes médicos como marcapasos.
2. NO se pare en el borde de la báscula ni salte sobre ella
3. NO sobrecargue la Báscula (MAX. 180kg / 396lb).
4. NO deje caer la báscula ni los objetos sobre ella , ya que esto podría dañar los sensores.
5. NO recomendado para mujeres embarazadas.
6. Cualquier medida obtenida con este dispositivo es solo para referencia y no debe considerarse como una opinión médica.
7. Siempre coloque la báscula en una superficie dura, seca y plana antes de la medición
8. Asegúrese de que sus pies estén secos antes de pisar la bascula.
9. Retire baterías si la escala no es utilizada por un periodo prolongado de tiempo.
10. El usuario menor a 6 años, solo usar función de peso, sin IMC (índice de masa corporal) y grasa corporal, datos etc.
11. El usuario menor de 10 años, usar solo peso y función de IMC, sin grasa corporal, datos etc.

COLOCACIÓN DE BATERÍAS


1. Abra la tapa que se encuentra debajo de la báscula como se observa en el diagrama.
2. Instale las baterías tomando en cuenta la polaridad que indica en el compartimento.
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de baterías.

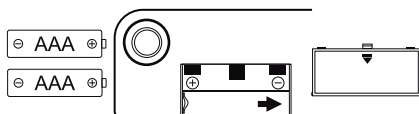

FUNCIONAMIENTO

1. Para asegurar la precisión de la báscula, colóquela sobre una superficie dura y plana.

Nota. Evite colocarla sobre una superficie resbalosa.

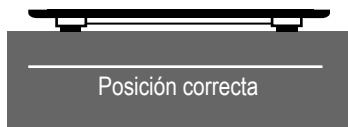

2. Suba con cuidado a la báscula, se encenderá automáticamente. Manténgase sobre la báscula sin

moverse hasta que aparezca el peso en la pantalla, cuando los números en el display parpadeen 3 veces y enseguida se queden fijos indicará su peso.




SÍMBOLOS DE INDICACIÓN

Lo	Batería baja; Cambiar las baterías.
Err	Sobrecarga.
C	Un error a ocurrido durante la medición; Baje de a báscula y repita el proceso.

CAMBIAR UNIDAD DE MEDIDA

El botón de cambio de unidades se encuentra en la parte posterior de la báscula **[UNIT]**, como se muestra en el diagrama. Con el botón **[UNIT]** podrá cambiar la unidad de medida, de kilogramos (**kg**) a libras (**lb**) y viceversa.

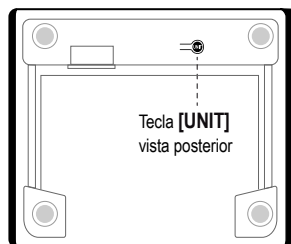

DESCARGA LA APLICACIÓN

Para usar la aplicación **FITDAYS** primero tendrá que descargar la aplicación a su teléfono inteligente. Lo puede hacer desde Google Play o App Store.

NOTA: La aplicación es compatible sólo con los sistemas operativos IOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior y sólo soporta un dispositivo smartphome a la vez

1. Posteriormente descargada la aplicación revise que su bluetooth este encendido.
2. Ingrese a la aplicación desde su teléfono o tableta y registre

3. Lea y acepte las políticas de privacidad.
4. Añada datos personales como sexo, edad, la altura etc (Ingresar datos incorrectos puede resultar en mediciones inexactas).



COMO USAR LA APLICACIÓN

Toque con el pie la báscula para activar la pantalla. Espere hasta que la pantalla muestre 0.0 (kg / lb).

Con su aplicación abierta en la pantalla principal colóquese con sus pies descalzos encima de las barras de metal.

NOTA: Debe colocar los pies descalzos sobre las barras metálicas.

Si subes a la báscula con calcetines o zapatos, solo se mostrará el peso y el IMC (índice de masa corporal) en la página principal.

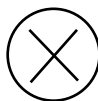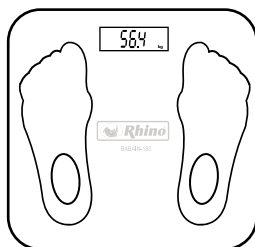

El número en la pantalla parpadeará mientras la báscula analiza los datos.

Continúa de pie sobre la báscula hasta que tu peso en el círculo de la aplicación sean estables, enseguida la aplicación te mostrará los datos obtenidos.

Podrás encontrar los resultados de peso, BMI (tasa metabólico basal), grasa corporal, grasa visceral; agua corporal musculo esquelético, masa muscular, edad corporal, proteína y BMR (tasa metabólico basal con kilocalorías) También puedes ver tus resultados recientes, por tus resultados recientes, por semana, mes ó año.

USUARIO



Agregue o cambie de usuario haciendo clic en mi perfil o bien haga clic en nuevo usuario.

La báscula y la app reconoce la variación de resultados, y le brinda la opción de realizar el cambio de usuario si los datos son distintos al usuario seleccionado.

NOTA. Cada cuenta puede soportar 24 usuarios.

MODO PESAJE DE BEBÉ

1. Haga clic en opciones, después, seleccione el **Modo Bebé**.
2. Suba a la báscula para que la aplicación determine su peso antes de cargar al bebé.

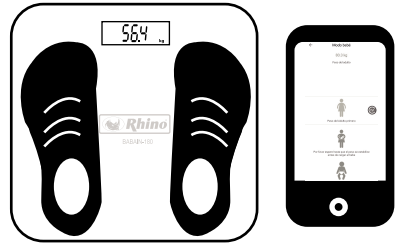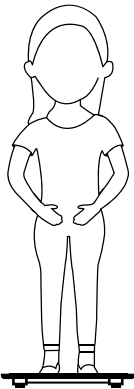

3. Después de que registre su peso, cargue al bebé y espere a que se estabilice la báscula para obtener el peso del bebé en la aplicación.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL CUERPO DEL EQUIPO

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Bluetooth no conectado	<p>La báscula y el teléfono deben tener Bluetooth activado</p> <p>Compruebe la versión de IOS de su teléfono inteligente debe ser IOS superior a 8.0 o superior / Android 5.0 o superior</p> <p>Reinicie su dispositivo móvil</p> <p>Remueva las baterías de la báscula y coloquelas nuevamente</p> <p>NOTA: La báscula solo soporta un dispositivo smartphone a la vez</p>
No se miden datos de grasa corporal	<p>El usuario debe estar descalzo para medir la grasa corporal</p> <p>Asegurese de que la báscula y sus pies estén secos</p>
La báscula está produciendo pesos inconsistentes	<p>Compruebe si la báscula está en una superficie dura y plana.</p> <p>Revise cada pie del sensor para asegurarse que no haya nada pegado en la parte inferior del mismo</p>
La aplicación muestra la proporción incorrecta de músculo	<p>La configuración del parámetro del cuerpo es incorrecta, verifique para asegurarse que ingreso correctamente los datos de sexo, edad y altura</p>
La báscula no se enciende.	<p>Retire las pilas y vuelva a ponerlas. asegúrese de insertar las baterías en la dirección correcta.</p>

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BABAIN-180NG marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977. Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor